

貼點位置分為前後向及朝外側:

小腿、背部、骨盆 擺放位置為前後側。



主要方向以感測器的正面朝向人體的**正面背面的矢狀面**(下圖紅色的剖面方向)進行擺放，感測器

上下軸向沿著肢段方向進行擺放

上臂、前臂、大腿、足部擺放位置為側邊。

主要方向以感測器的正面朝向人體的**側向的冠狀面**(下圖藍色的剖面方向)進行擺放，感測器上下

軸向沿著肢段方向進行擺放。

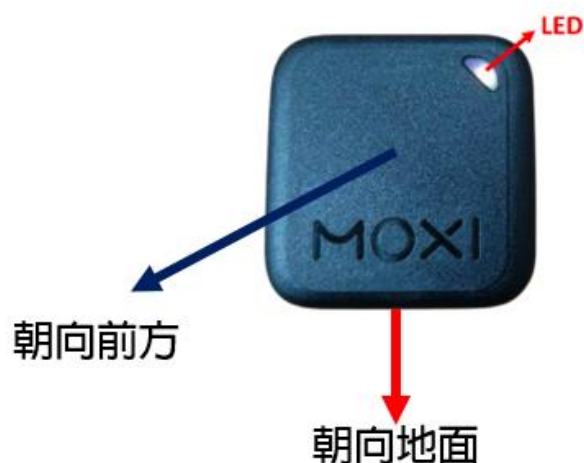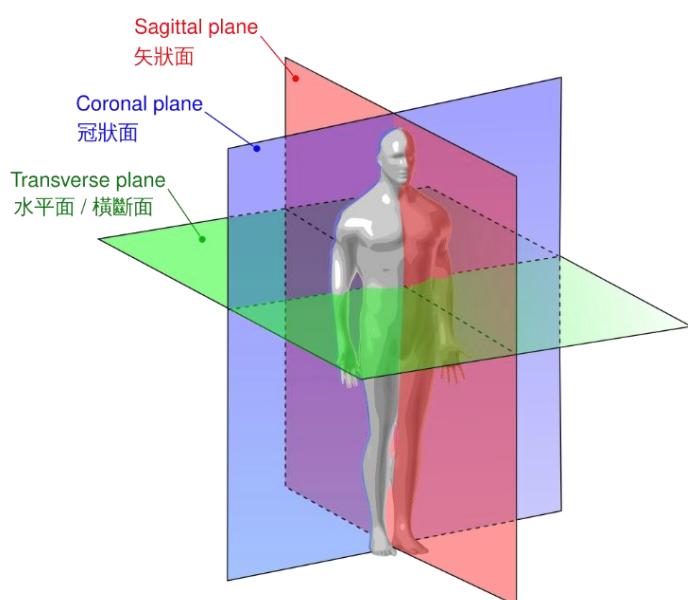

*感測器正向擺放方式: 盡量讓感測器軸向與動作軸向對齊

*感測器紅色箭頭與貼點紅色箭頭方向一致，朝身體長軸方向




全身感測器擺放圖(前臂、上臂、背部、骨盆、大腿、小腿、足部)

動作角度定義



關節	定義	關節	定義
1. 肘關節:	上臂及前臂夾角	2. 肩關節:	上臂及上背夾角
3. 軀幹骨盆角度:	骨盆及大腿夾角	4. 髖關節:	骨盆及大腿夾角
5. 膝關節:	大腿及小腿夾角	6. 踝關節:	小腿及足部夾角
7. Torso 角度:	上背與水平線夾角		

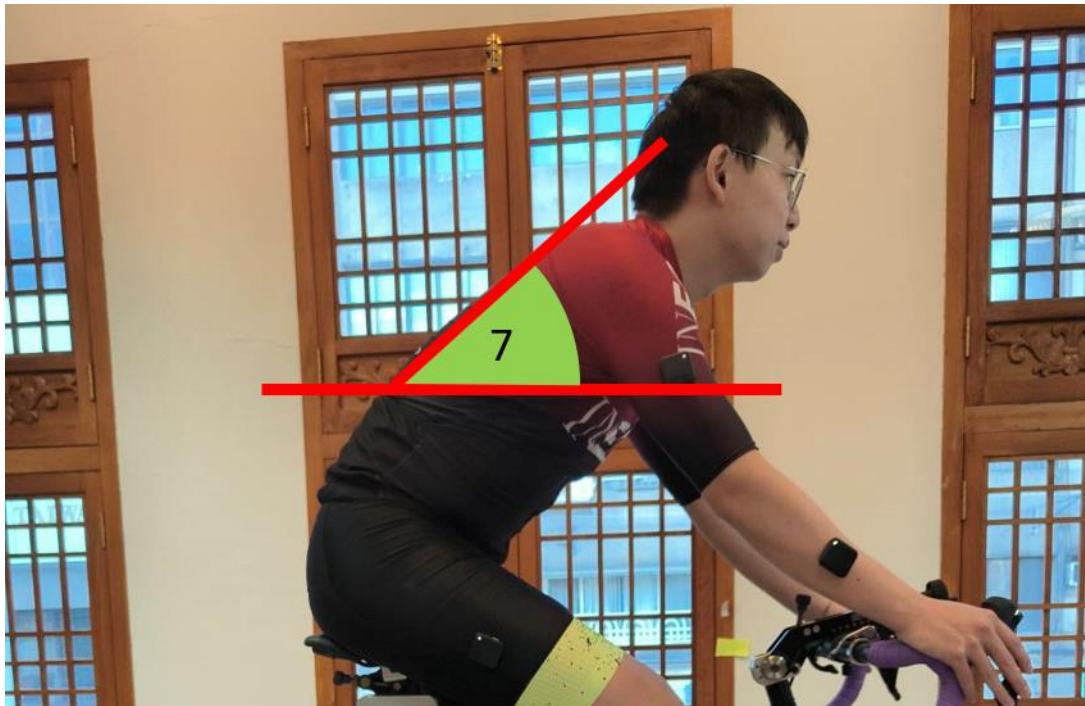


Torso 角度定義

側邊貼點介紹:足部、大腿、上臂、前臂

部位


圖片

腳跟

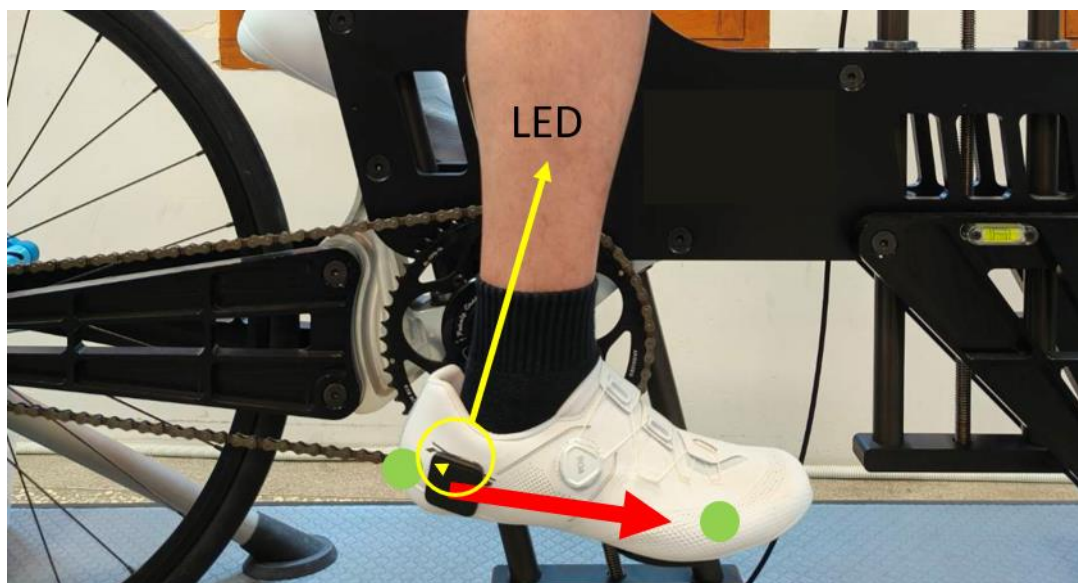


LED 燈號朝向腳跟方向黏貼(以可以穩定附著於)，原則盡量與腳跟及腳趾在同一水平面上

大腿

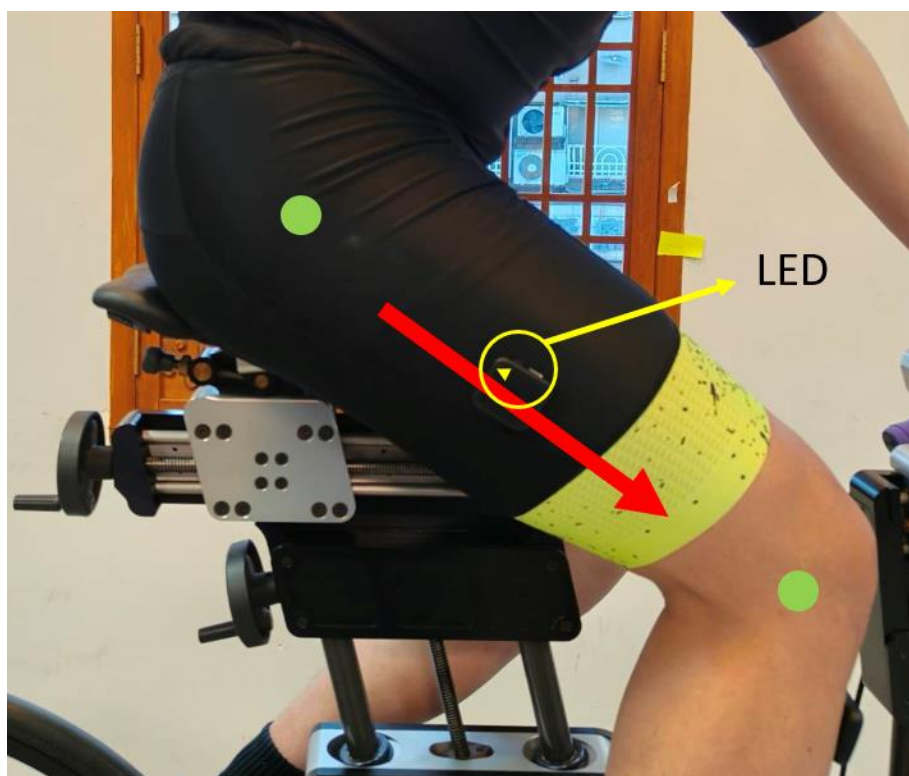

LED 燈號朝向大轉子方向，沿著膝關節中心到大轉子方向連線擺放。

上臂
及前
臂

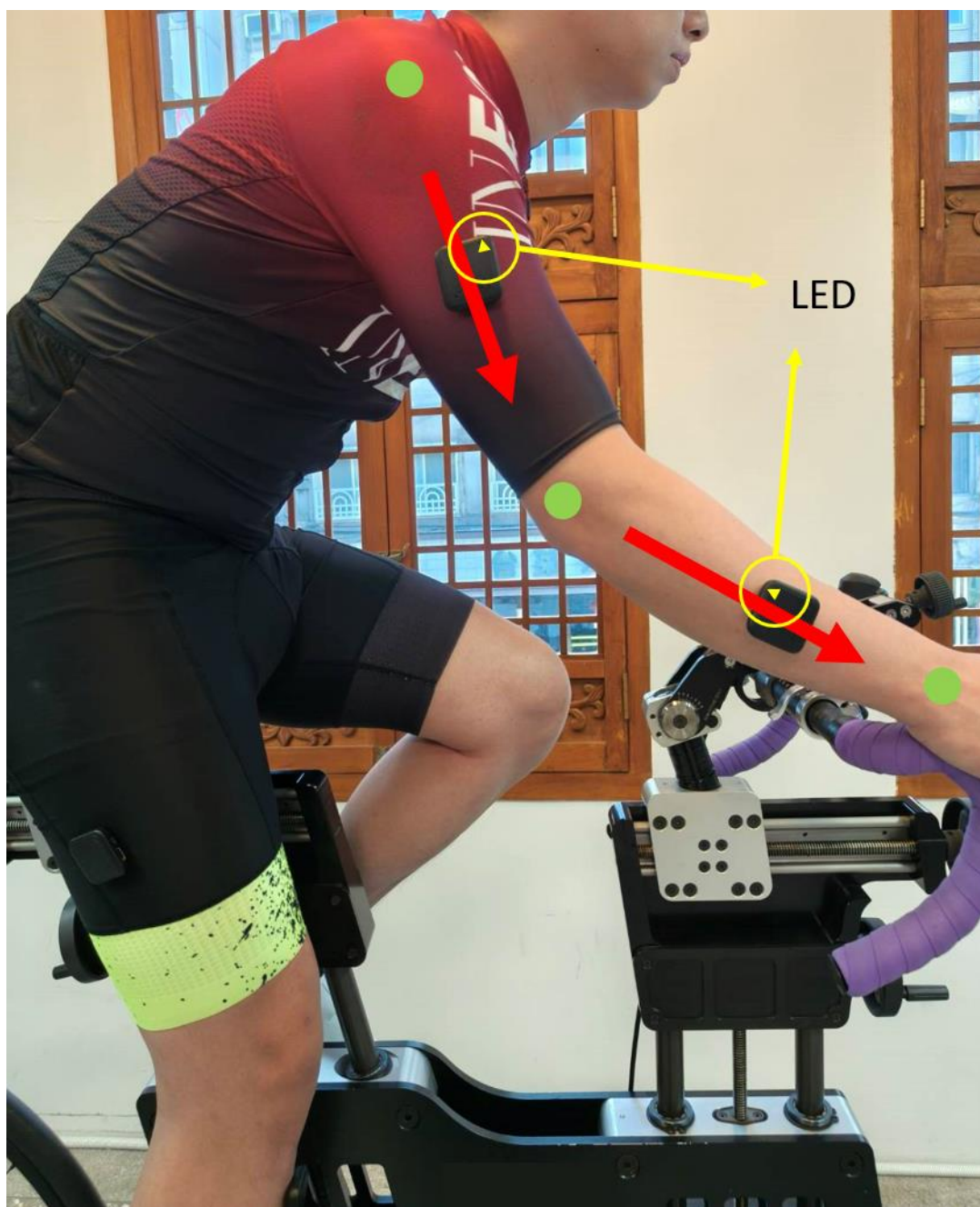


LED 燈朝肘關節及肩關節方向，沿著腕關節中心及肘關節中心連線、肘關節及肩關節中心連線位置進行擺放。


正面背面貼點方式: 小腿、骨盆、上背

部位

圖片

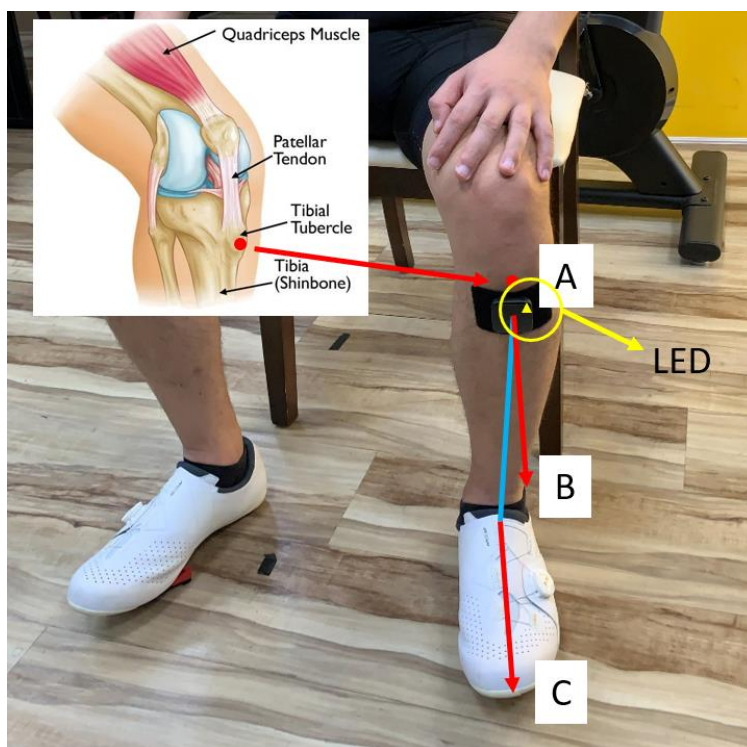



小腿

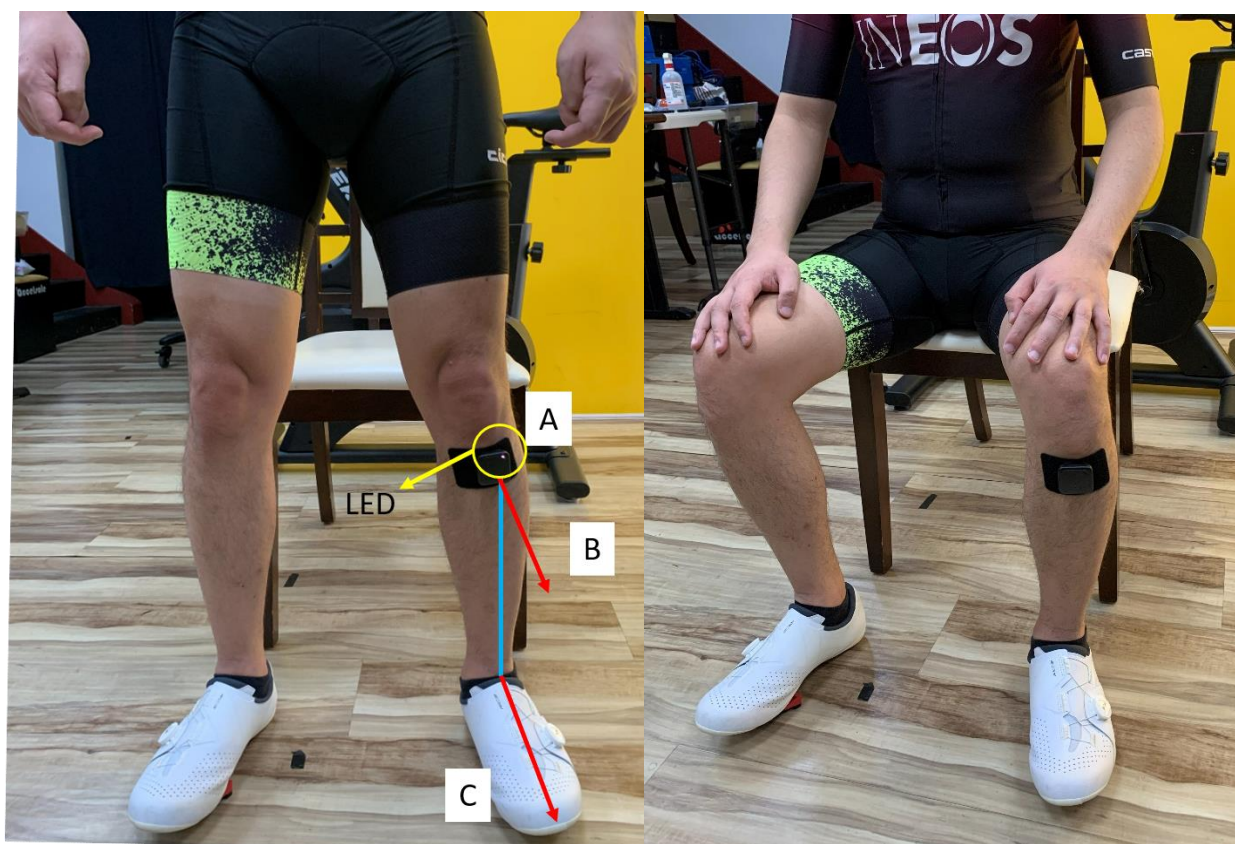

Moxi 字樣(正面)朝向前方並擺放在脛骨粗隆下方 (A) , 同時滿足感測器 B 軸方向 , 朝向 23 腳趾


骨間(C 軸)

腰

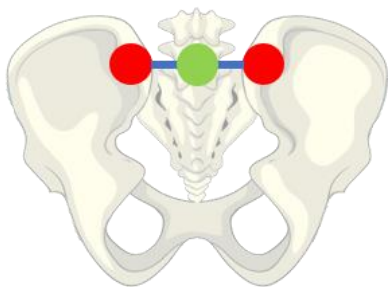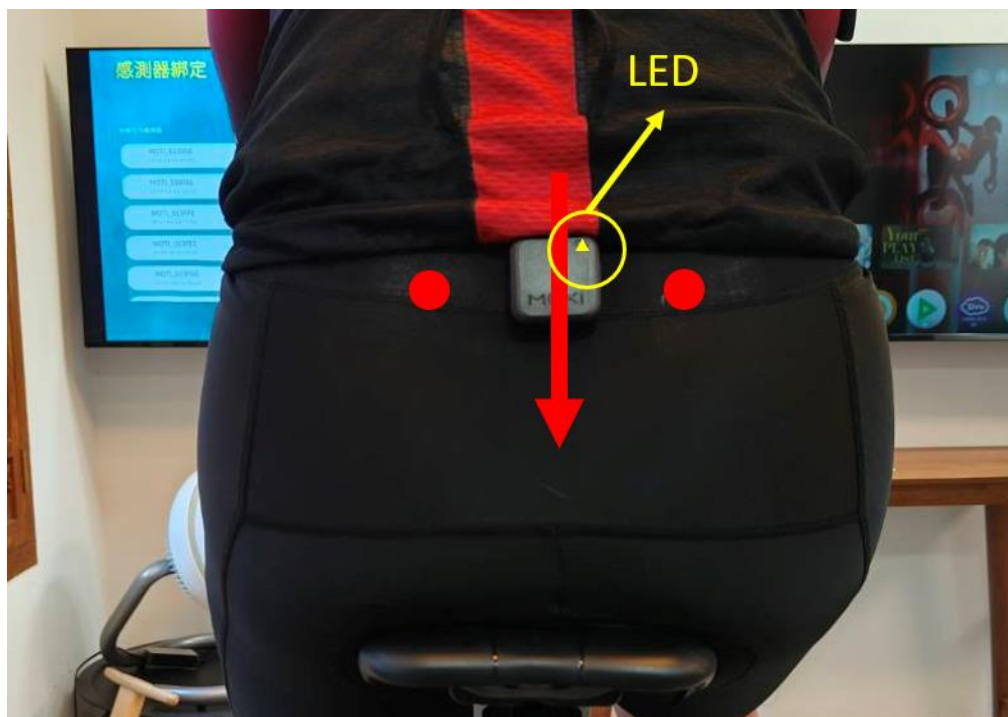

黏貼於兩邊 PSIS(紅色)的中間 (接近 L5 位置-綠色) · MOXI 字樣朝人體後方

上背

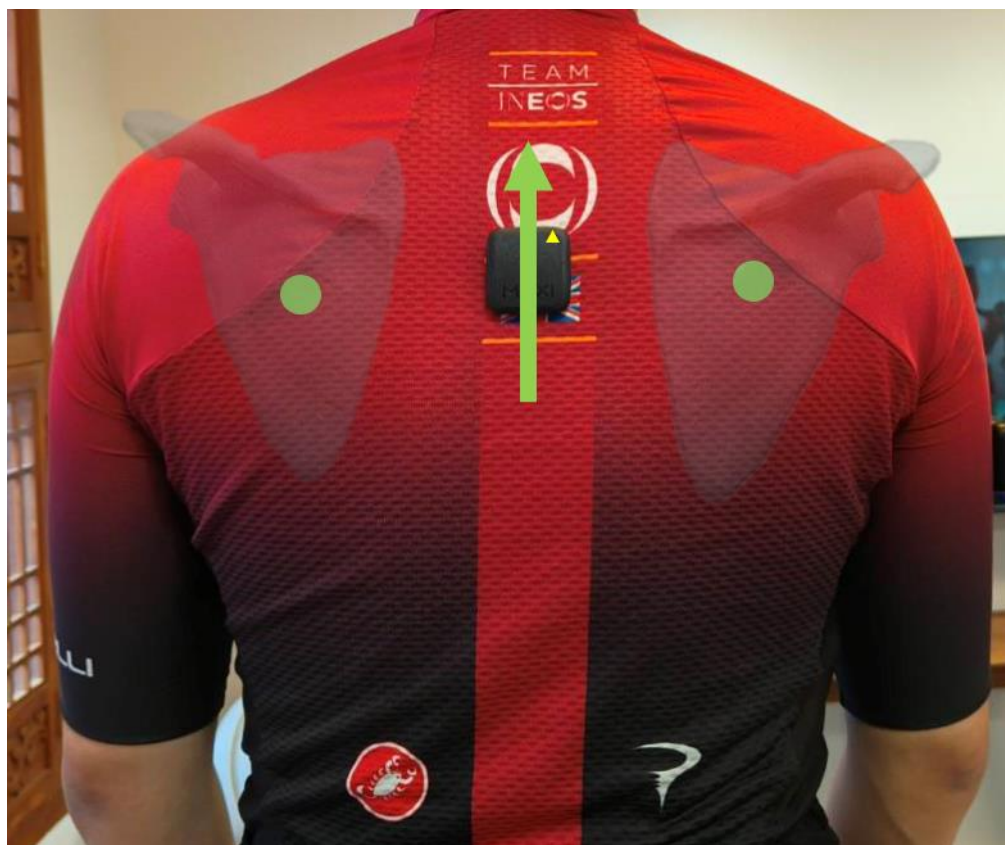

胸椎第 3-第 5 節位置，介於兩肩胛骨中間，MOXI 字樣朝人體後方。
